



RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština

Rozložení koloběžky eFOLDi Explorer




eFOLDi


Před nastartováním postavte skútr vzpřímeně v otevřeném prostoru mimo domácí zvířata a malé děti.

Rozložení koloběžky je jednoduché, s trochou cviků ji zvládnete postavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám na skútru trénovat.

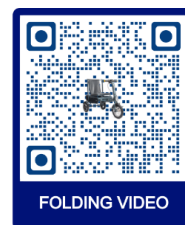

FOLDING VIDEO

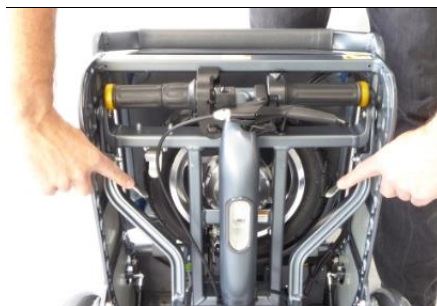

1

Najděte západky „B“ a „C“.



2

Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a...



3

...vytáhněte rukojeť pro přenašení do svislé polohy.



4

Uvolněte řídítka zatažením směrem k sobě.



5

Zatlačením na řídítka dolů a dovnitř uvolněte západku „E“.



6

Vytáhněte sloupek řízení nahoru a přes rukojeť, dokud nezapadne na místo.



7

Prudkým zatažením nebo otočením přední kolo uvolněte.



8

Spusťte skútr na zem a opatrně jej držte.



9

Vytáhněte sloupek řízení nahoru...



10

...a ujistěte se, že klíč sloupku zapadl na místo pod západkou „A“.



11

Vytáhněte sedadlo vzpřímeně.



12

Zatlačte stupačky dolů. Váš skútr je nyní připraven.

Skládání koloběžky eFOLDi Explorer Scooter

		
1 Sklopte nožičky do vzpřímené polohy.	2 Sklopte sedadlo dozadu.	3 Stiskněte a uvolněte západku „A“.
		
4 Sklopte sloupek řízení naplocho k sedadlu.	5 Zvedněte skútr do vzpřímené polohy.	6 Ujistěte se, že přední kolo je ploché a zajištěné k rámu magnetem.
		
7 Najděte západku „D“.	8 Při podepření sloupku řízení stiskněte západku „D“...	9 ...a přesuňte sloupek řízení přes rukojeť.
		
10 Zatlačte sloupek řízení do rámu, dokud západka „E“ nezapadne.	11 Přitlačte řídítka k rámu, dokud je magnet nezajistí na místě.	12 Stiskněte a podržte západky „B“ a „C“ a sklopte rukojeť dolů.

Baterie/nabíječka eFOLDi Explorer

 Nabíjecí bod USB Napájení		
Vyjměte baterii odemknutím pomocí klíče a jemným tlakem. Baterie má body pro nabíjení a pro napájení mobilního zařízení.	Vaše nabíječka je umístěna ve spodní části jedné z polystyrenových vložek.	Vložte klíč a zapněte jej otočením rukojeti. Baterii dobíjete každé 3 měsíce nebo když indikátor napájení ukazuje 24 nebo méně.